



FEM2-AMBIENTE
SPIN-OFF ACCREDITATA
DALL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
MILANO-BICOCCA

Servizi di diagnostica molecolare per l'avifauna

SERVIZIO CLIENTI:

da lunedì al venerdì (9.30-18.30)

ufficio@fem2ambiente.com

02 6448 3386 (chiamate)

371 180 9921 (WhatsApp)

FEM2-Ambiente

PROCEDURA ANALISI DNA PER AVIFAUNA

per la determinazione del sesso
e diagnostica di patologie (APV-BFDV e Clamidia)

avifauna.fem2ambiente.com

ACCEDI AL SITO
avifauna.fem2ambiente.com



Servizi di diagnostica molecolare per l'avifauna

SERVIZIO CLIENTI:
dal lunedì al venerdì (9.30-18.30)
ufficio@fem2ambiente.com
371 180 9921 (chiamate e WhatsApp)

SCOPRI IL NOSTRO SERVIZIO

AREA CLIENTI

INSERISCI NUOVO
ORDINE

ACCEDI ALLA TUA
PAGINA PERSONALE

TRACCIA LA TUA
SPEDIZIONE

Diagnostica molecolare per l'avifauna

FEM2-Ambiente è leader Italiano nell'erogazione di servizi diagnostici per l'avifauna. Offriamo due categorie di servizi basati sull'analisi del DNA, sessaggio e ricerca di patologie

SESSAGGIO (DETERMINAZIONE DI GENERE MASCHIO O FEMMINA)

- SMAP – Sessaggio Molecolare di Avifauna da Piuma
- SMAU – Sessaggio Molecolare di Avifauna da Uovo
- SMAR – Sessaggio Molecolare di Avifauna Rapido

IDENTIFICAZIONE DI AGENTI PATOGENI (PRESENZA O ASSENZA DI DNA DEI PRINCIPALI PATOGENI)

- ADV – Adenovirus

NON PERDERE I NOSTRI AGGIORNAMENTI

Iscriviti alla nostra newsletter o seguici su
facebook!

Nome (richiesto)

Email (richiesto)



Ho preso visione dell'informativa sulla

CLICCA SU
"INSERISCI NUOVO ORDINE"



AREA CLIENTI



INSERISCI NUOVO
ORDINE

ACCEDI ALLA TUA
PAGINA PERSONALE

TRACCIA LA TUA
SPEDIZIONE

Diagnostica molecolare per l'avifauna

FEM2-Ambiente è leader Italiano nell'erogazione di servizi diagnostici per l'avifauna. Offriamo due categorie di servizi basati sull'analisi del DNA, sessaggio e ricerca di patologie

SESSAGGIO (DETERMINAZIONE DI GENERE MASCHIO O FEMMINA)

- SMAP – Sessaggio Molecolare di Avifauna da Piuma
- SMAU – Sessaggio Molecolare di Avifauna da Uovo
- SMAR – Sessaggio Molecolare di Avifauna Rapido

IDENTIFICAZIONE DI AGENTI PATOGENI (PRESENZA O ASSENZA DI DNA DEI PRINCIPALI PATOGENI)

- ADV – Adenovirus

NON PERDERE I NOSTRI AGGIORNAMENTI

Iscriviti alla nostra newsletter o seguici su
facebook!

Nome (richiesto)

Email (richiesto)



Ho preso visione dell'informativa sulla

SEI GIÀ REGISTRATO O HAI LA TUA PAGINA PERSONALE?

NO

Effettua la registrazione.

SI

Effettua il login utilizzando la tua email e la password da te selezionata e passa al PUNTO2 "INSERISCI NUOVO ORDINE"

The screenshot shows the top navigation bar with a 'HOME' button and a login section containing 'email' and 'password' input fields, a 'Login' button, and a link for 'Password dimenticata?'. Below the navigation bar, the main content area features the heading 'BENVENUTI NELLA SEZIONE ORDINI DEL PORTALE AVIFAUNA' followed by a list of actions: 'crea il tuo ordine', 'controlla i risultati', and 'scarica gli attestati'. A prominent yellow button labeled 'Registrati qui' is positioned below this list. At the bottom of the main content area, the text 'Oppure effettua il Login in alto' is displayed. Red arrows from the 'NO' and 'SI' callouts point to the 'Registrati qui' button and the login fields, respectively.

Sei registrato ma non ricordi la password? Segui la procedura per reimpostarla o contattaci:

02 6448 3386

communication@fem2ambiente.com

371 180 9921(SMS o WhatsApp)



FEM2-AMBIENTE
SPIN-OFF ACCREDITATA
DALL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
MILANO-BICOCCA

Servizi di diagnostica molecolare per l'avifauna

SERVIZIO CLIENTI:

da lunedì al venerdì (9.30-18.30)

ufficio@fem2ambiente.com

02 6448 3386 (chiamate)

371 180 9921 (WhatsApp)

1. REGISTRAZIONE

avifauna.fem2ambiente.com


FORM DI REGISTRAZIONE


Esegui la registrazione compilando tutti i campi richiesti.

1



Indica se sei
amatore,
allevatore,
veterinario o
negoziante

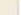


REGISTRAZIONE




TIPOLOGIA UTENTE 

Selezionare la propria lingua 


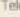
DATI PERSONALI

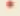

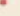Nome e Cognome / Ragione Sociale  Codice Fiscale / Partita Iva 

Indirizzo  Numero Civico  CAP 



Città  Provincia  Nazione 

CONTATTI

Telefono  Telefono Secondario 



Email  Ripeti email 

PASSWORD

Password  Ripeti Password 


CONVENZIONI


Sei iscritto ad una associazione convenzionata con FEM2 - Ambiente? No (lasciare selezionato in caso di dubbio) Sì

Nome Associazione  Numero Tessera 

FEM2 - Ambiente si riserva di verificare la correttezza dei dati inseriti

TERMINI, CONDIZIONI DI VENDITA, COOKIES E PRIVACY

Accettazione TERMINI, CONDIZIONI DI VENDITA, COOKIES [\(link\)](#) 

Accettazione PRIVACY [\(link\)](#) 

I campi con * sono obbligatori

3

Inserisci una
password a
tua scelta.

5

Non
dimenticare
di accettare
termini e
condizioni.

2

Inserisci i tuoi
dati anagrafici

4

Segnalaci la
tua eventuale
iscrizione ad
un'associazione
convenzionata
con noi.

6

REGISTRATI

CONFERMA DI REGISTRAZIONE

Riceverai una email per confermare la tua registrazione
Clicca sul link al suo interno per confermare.

FEM2Ambiente - Avifauna - Conferma registrazione Posta in arrivo x

FEM2Ambiente <sessaggio@fem2ambiente.com>
a me

20 lug ☆

FEM2 FEM2-AMBIENTE!
SOCIETÀ SPIN-OFF
DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
MILANO-BICOCCA

AVIFAUNA.FEM2AMBIENTE.COM

Gentile ,
Grazie di esserti registrato sul portale avifauna di FEM2 - AMBIENTE!

Per confermare la tua registrazione clicca sul link che troverai qui di seguito
http://avifauna.fem2ambiente.com/ordini/confirm_registration/risultatiavifauna%40gmail.com/93bd333919d2e376cbcd84ade951212a

In alternativa, puoi copiare e incollare il link nel tuo browser internet preferito.
Per qualsiasi necessità non esiti a contattarci, rispondendo a questa e-mail o al numero 02 6448 3386.

Cordiali saluti,
Lo staff
FEM2 - AMBIENTE


Copyright © 2013 FEM2 - Ambiente Srl

NB. Se non ricevi l'email di conferma reimpostarla o contattaci:
02 6448 3386 | communication@fem2ambiente.com | 371 180 9921(SMS o WhatsApp).
Penseremo noi ad attivare il tuo account.

REGISTRAZIONE EFFETTUATA CON SUCCESSO

Ora puoi accedere alla tua pagina personale inserendo l'email e la password indicate in fase di registrazione.

Potrai inserire e monitorare i tuoi ordini, visualizzare i risultati scaricare gli attestati e modificare i dati personali.

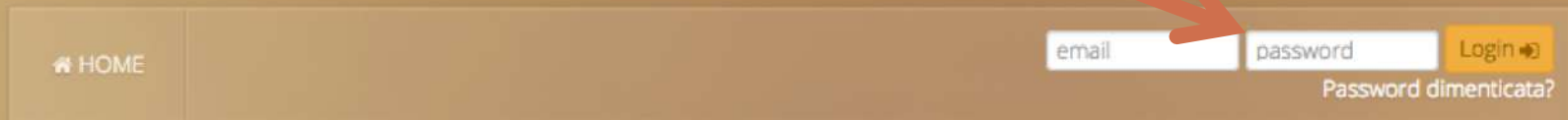

A navigation bar with a home button on the left and login fields on the right. The home button is labeled 'HOME' with a house icon. The login fields include an 'email' input field, a 'password' input field, and a 'Login' button with a key icon. Below the password field is a link for 'Password dimenticata?'. A red arrow points from the top of the page to the password input field.

BENVENUTI NELLA SEZIONE ORDINI DEL PORTALE AVIFAUNA

crea il tuo ordine
controlla i risultati
scarica gli attestati

[Registrati qui](#)

Oppure effettua il Login in alto



FEM2-AMBIENTE
SPIN-OFF ACCREDITATA
DALL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
MILANO-BICOCCA

Servizi di diagnostica molecolare per l'avifauna

SERVIZIO CLIENTI:

da lunedì al venerdì (9.30-18.30)

ufficio@fem2ambiente.com

02 6448 3386 (chiamate)

371 180 9921 (WhatsApp)

SCOPRI IL NOSTRO SERVIZIO

2. INSERIMENTO NUOVO ORDINE

avifauna.fem2ambiente.com

PANORAMICA PAGINA PERSONALE

NUOVO ORDINE
Clicca qui per inserire
un nuovo ordine.

CREDITI RIMANENTI
Qui, se acquistati, puoi
visualizzare il totale
dei tuoi crediti

**MODIFICA
DATI PERSONALI**

**SEZIONE ACQUISTO
CREDITI PER
PACCHETTI
PREPAGATI**

PAGINA PERSONALE

[Nuovo Ordine](#) € 3,00

ORDINI IN CORSO

Data	Stato
Venerdì 29 Set. 2017 13:48	Waiting for Invoice

ORDINI CHIUSI

Data	n°	Stato
Lunedì 28 Ago. 2017 12:58		Closed
Martedì 27 Giugno 2017 09:48		Closed
Lunedì 12 Giugno 2017 12:21		Closed

STORICO ORDINI MODIFICA DATI PERSONALI PACCHETTI CREDITI FEM

Qui puoi visualizzare l'avanzamento dello stato dei tuoi ordini ancora in corso. Clicca sull'ordine per visualizzare i dettagli e i risultati disponibili.

Qui puoi visualizzare i dati dei tuo ordini passati. Clicca sull'ordine per visualizzare i dettagli, i risultati e scaricare gli attestati se richiesti.

INSERIMENTO NUOVO ORDINE – INSERIMENTO CAMPIONI

Dopo aver cliccato su “Nuovo ordine” visualizzerai la seguente pagina

1) INSERIMENTO DATI DEL SOGGETTO

Riporta l'identificativo e specie del soggetto selezionandola da menu a tendina che si aprirà.

La mutazione è opzionale

NB. Ciò che riporti in questo campo dovrà essere riportato anche sulle buste contenenti campioni.

Se il soggetto non ha anello puoi inserire un qualunque nome.

NON TROVI LA SPECIE DEL TUO SOGGETTO?

Spunta la casella “Specie non trovata” e inserisci manualmente il nome della specie. Inserisci tutti i soggetti e attendi conferma da parte del nostro laboratorio. (Non dovrai pagare nulla fino a conferma avvenuta)

2) SELEZIONE DEL TIPO DI ANALISI

Seleziona le analisi di cui hai bisogno:

- **SMAP= sesso molecolare da piuma (5 giorni lavorativi)**
- **SMAU=sessaggio molecolare da uovo,**
- **SMAR=Sessaggio molecolare rapido (3 giorni lavorativi).**


e se desideri ricevere l'**attestato in forma digitale e stampabile** o in **forma cartacea** (inviato all'indirizzo indicato in fase di registrazione).

3) PROPRIETARIO

Indica il nome del proprietario, nel caso in cui non sia tu.

4) Clicca su “INSERIMENTO CAMPIONE” e ripeti per tutti i campioni da analizzare.

DOPO AVER INSERITO TUTTI I CAMPIONI CLICCA SU “VAI AL RIEPILOGO”

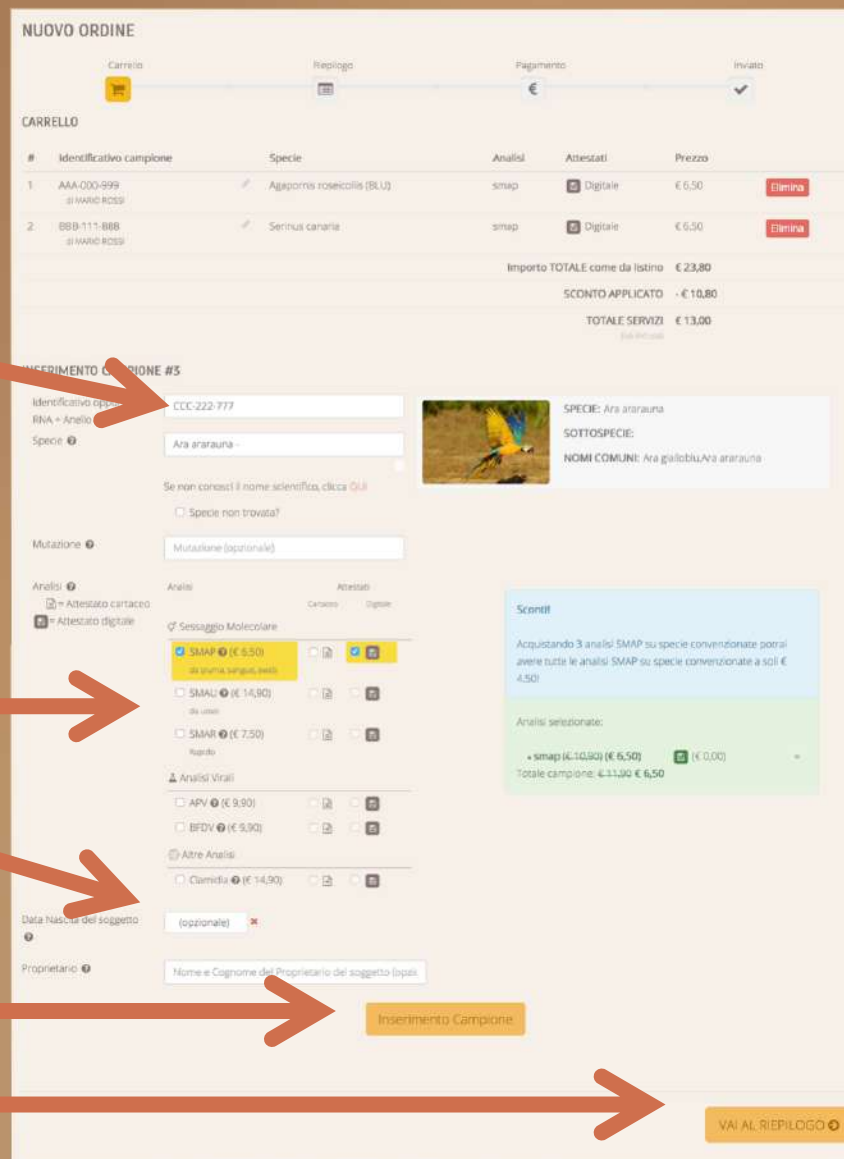

NUOVO ORDINE

Carrello | Riepilogo | Pagamento | Inviato

CARRELLO

#	Identificativo campione	Specie	Analisi	Attestati	Prezzo	
1	AAA-000-999 @WAWD-RDSD	Agapornis roseicollis (BLU)	smap	<input checked="" type="checkbox"/> Digitale	€ 6,50	Elimina
2	BBB-111-888 @WAWD-RDSD	Serinus canaria	smap	<input checked="" type="checkbox"/> Digitale	€ 6,50	Elimina

Importo TOTALE come da listino € 23,80
SCONTO APPLICATO € -10,80
TOTALE SERVIZI € 13,00

INSERIMENTO CAMPIONE #5

Identificativo campione: CCC-222-777
 RNA = Anello:
 Specie: Ara ararauna
 Se non conosci il nome scientifico, clicca Qui
 Specie non trovata?
 Mutazione: Mutazione (opzionale)
 Analisi: SMAP (€ 6,50) da piuma singolo, 5-10 gg
 SMAU (€ 14,90) da uovo
 SMAR (€ 7,50) rapido
 Attestati: Cartaceo Digitale
 Attestato digitale
 Analisi Virali: APV (€ 9,90) BFDV (€ 9,90)
 Altre Analisi: Clamidia (€ 14,90)
 Data nascita del soggetto: (opzionale)
 Proprietario: Nome e Cognome del Proprietario del soggetto (opz.)

[Inserimento Campione](#)

Scorri
Acquistando 3 analisi SMAP su specie convenzionate potrai avere tutte le analisi SMAP su specie convenzionate a soli € 4,50!
 Analisi selezionate:
 • smap (€ 10,50) (€ 6,50) (€ 0,00)
 Totale campione: € 11,90 € 6,50

[VAI AL RIEPILOGO](#)

RIEPILOGO ORDINE

Controlla di aver inserito tutte le informazioni corrette.

NUOVO ORDINE

Carrello | Riepilogo | Pagamento | Invitato

RIEPILOGO

Per prelevare correttamente le piume e altri consigli [clicca qui](#)

CAMPIONI DA ANALIZZARE

#	Identificativo campione	Specie	Analisi	Attestati	Prezzo
1	AAA-000-999 <small>di MARIO ROSSI</small>	Agapornis roseicollis (BLU)	smap	Digitale	€ 6,50
2	BBB-111-888 <small>di MARIO ROSSI</small>	Serinus canaria	smap	Digitale	€ 6,50
3	CCC-222-777	Accipiter gentilis (Aspecie junior)	smap	Digitale	€ 6,50

Importo TOTALE come da listino € 35,70
SCONTO APPLICATO -€ 16,20
TOTALE SERVIZI € 19,50

CAMPIONI STANDARD

È TUTTO CORRETTO?

NO **SI**

informazioni richieste:
Seleziona la specie: Identificativo oppure RNA + Ac:
 Maschio Femmina ♀

Identificativo campione: Specie: Sesso:

MODIFICA L'ORDINE **PROCEDI CON IL PAGAMENTO**

IMPORTO TOTALE
DELLE ANALISI

PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato tramite Bollettino Postale, Bonifico Bancario, PayPal.

NUOVO ORDINE

Carrello — Riepilogo — **Pagamento** — Inviato

PAGAMENTO

Modalità Pagamento ⓘ

Bonifico Bancario

Bollettino Postale

PayPal

Bollettino Postale

Per effettuare il pagamento utilizza le seguenti coordinate, indicando la causale che ti verrà comunicata nella email di conferma dell'ordine.

Beneficiario: Fem2 – Ambiente Srl
C/C n. 07567082

Importo totale servizi	€ 20,00
Importo rimanente da saldare	€ 16,50
Commissioni ⓘ	€ 0,50
IMPORTO TOTALE <small>(tutti i prezzi sono IVA inclusa)</small>	€ 17,00

[Termini e Condizioni di vendita e Cookies qui](#)
[Condizioni Privacy qui](#)

[Promemoria Ordine](#)

[RITORNA AL RIEPILOGO](#) [INVIA ORDINE](#)

SELEZIONA IL METODO DI PAGAMENTO CHE PREFERISCI

Nel box azzurro troverai tutti i dettagli per il pagamento

INVIA L'ORDINE



FEM2-AMBIENTE
SPIN-OFF ACCREDITATA
DALL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
MILANO-BICOCCA

CONFERMA ORDINE

Se l'inserimento dell'ordine è andato a buon fine riceverai una email di conferma con i dettagli dell'ordine, i dati del pagamento e l'indirizzo a cui spedire i tuoi campioni.



FEM2-AMBIENTE
SOCIETÀ SPIN-OFF
DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
MILANO-BICOCCA

AVIFAUNA.FEM2AMBIENTE.COM

la ringraziamo per il suo ordine numero # [redacted] e le confermiamo che è stato inoltrato con successo.

Cogliamo l'occasione per ricordarle che restiamo in attesa del pagamento tramite Bollettino postale come da lei indicato e che può indicare come causale: SMAP# [redacted]

Consigliamo di inviare i campioni a mezzo raccomandata al seguente indirizzo, inserendo nella busta anche la ricevuta di pagamento:

FEM2Ambiente Srl - Piazza della Scienza, 2 - 20126 Milano

I video che mostrano la corretta procedura di campionamento sono disponibili [qui](#).

Può monitorare lo stato del suo ordine, collegandosi alla sua pagina personale o al seguente link:
[Ordine](#) [redacted]

Per qualsiasi necessità non esiti a contattarci, rispondendo a questa email o al numero 02 6448 3386.

Cordiali saluti,

Lo staff

FEM2 - AMBIENTE





FEM2-AMBIENTE
SPIN-OFF ACCREDITATA
DALL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
MILANO-BICOCCA

Servizi di diagnostica molecolare per l'avifauna

SERVIZIO CLIENTI:

da lunedì al venerdì (9.30-18.30)

ufficio@fem2ambiente.com

02 6448 3386 (chiamate)

371 180 9921 (WhatsApp)

3. PRELIEVO E INVIO DEI CAMPIONI

avifauna.fem2ambiente.com

CAMPIONAMENTO

Il campionamento è un presupposto fondamentale per il buon esito dell'analisi e per questo motivo deve essere effettuato con la massima accortezza.

ATTENZIONE! **Lavarsi le mani tra il prelievo da un soggetto ad un altro**, in modo da evitare il passaggio di DNA del primo animale al successivo.

CAMPIONI PER SESSAGGIO – APV – BFDV



PIUME

Devono avere un **calamo integro**, non strappato e di **idonee dimensioni** (almeno 3/4 mm).

A seconda della specie, la tipologia e la quantità di penne necessarie variano:

- **esemplari di taglia piccola** come inseparabili, cardellini, canarini: 2 penne della coda o delle ali e 2 penne del petto
- **esemplari di taglia grande** come Ara, Amazzoni, Rapaci, ...: 2 penne del petto e 2 penne dei fianchi

Se è presente **materiale ematico**, come nel caso delle penne in crescita, per favorire la conservazione del DNA è opportuno avvolgere il campione in un foglio di carta assorbente



UOVO

Il guscio e la membrana interna dell'uovo devono essere integri e asciutti.

Per evitare che il DNA si degradi, cosa che accade ad esempio quando l'uovo è umido, il campione deve essere avvolto in un foglio di carta assorbente (se inviato entro sette giorni dalla schiusa) oppure immerso e conservato in alcool puro (se inviato dopo sette giorni dalla schiusa) e mantenuto a temperatura ambiente fino al momento dell'invio.



SANGUE

Il prelievo va effettuato in condizioni di **sterilità**, da una persona esperta come un **medico veterinario**, in modo da evitare traumi o infezioni. Bastano poche gocce, che devono essere tassativamente inserite in una **provetta con EDTA**, che ne impedisce la coagulazione.

CAMPIONI PER CLAMIDIA

È consigliabile il prelievo di un tampone cloacale. Previ accordi con i veterinari è possibile mandare anche campioni di sangue e penne.

CAMPIONAMENTO

Per maggiori informazioni sul campionamento visita il nostro sito,
troverai anche dei video tutorial

avifauna.fem2ambiente.com/home/video/

HOME

CHI SIAMO

SERVIZIO DI ANALISI

PREZZI

ORDINI

CAMPIONAMENTO

TRACCIA SPEDIZIONE

CONTATTI

WHATSAPP: 371-180-9921 | TELEFONO: 02 6448 3386 | EMAIL: COMMUNICATION@FEM2AMBIENTE.COM

Campionamento

Il campionamento è un presupposto fondamentale per il buon esito dell'analisi e per questo motivo deve essere effettuato con la massima accortezza

È buona norma lavarsi le mani tra il prelievo da un soggetto ad un altro, in modo da evitare il passaggio di DNA del primo animale al successivo.

L'analisi per il **sessaggio, APV e BFDV** viene effettuata su:

- PENNE

AREA CLIENTI

INSERISCI NUOVO ORDINE

ACCEDI ALLA PAGINA PERSONALE

PROCEDURA DI INVIO E PRELIEVO
CAMPIONI

INVIO DEI CAMPIONI

MODALITA' DI SPEDIZIONE



I campioni prelevati devono essere inseriti in bustine trasparenti a chiusura ermetica.
(Eventualmente possono essere utilizzati anche i sacchetti per surgelati).

ATTENZIONE!

**Su ogni bustina deve essere riportato l'identificativo del soggetto,
che deve corrispondere a quello indicato in fase d'ordine.**

INVIO DEI CAMPIONI

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

I campioni possono essere inviati o consegnati al seguente indirizzo

FEM2-Ambiente Srl

c.a. Laboratorio

Piazza della Scienza 2

20126 – Milano

I campioni consegnati a mano possono essere lasciati alla portineria dell'edificio U3 dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie.
dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Si consiglia la spedizione dei campioni tramite

RACCOMANDATA

in quanto tracciabile in tutto il suo percorso e con tempi più rapidi garantiti.



FEM2-AMBIENTE
SPIN-OFF ACCREDITATA
DALL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
MILANO-BICOCCA

Servizi di diagnostica molecolare per l'avifauna

SERVIZIO CLIENTI:

da lunedì al venerdì (9.30-18.30)

ufficio@fem2ambiente.com

02 6448 3386 (chiamate)

371 180 9921 (WhatsApp)

4. RISULTATI

avifauna.fem2ambiente.com

6) RISULTATI

Se i campioni inviati rispettano gli standard richiesti, il laboratorio garantisce l'esito entro
5 giorni lavorativi
dal momento in cui riceviamo i campioni e dopo l'avvenuto pagamento.

Riceverai i risultati via email e potrai visualizzarli sulla tua pagina personale.



**SCARICA
GLI
ATTESTATI**
Se
acquistati.

FEM2Ambiente
a communication

FME FEM2-AMBIENTE!
SOCIETÀ SPIN-OFF
DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
MILANO-BICOCCA

AVIFAUNA.FEM2AMBIENTE.COM

Gentile

La informiamo che sono state completate le analisi relative al suo ordine numero #

Qui di seguito i risultati, che possono essere visualizzati anche collegandosi alla sua pagina personale o utilizzando il seguente link: Ordine #

I certificati digitali, se richiesti, sono disponibili alla sua pagina personale.

#	Identificativo	Specie	Analisi	Esiti
1	AAA-111	Turdus philomelos - Turdus philomelos	SMAP	M

Cordiali saluti





Lo staff
FEM2 - AMBIENTE

Copyright © 2013 FEM2 - Ambiente Srl

ESITI:
M= Maschio
F =Femmina
NEG=Negativo
POS=Positivo

ORDINE N° # - **CLOSED**

CAMPIONI

Identificativo campione	Specie	Analisi / Stato / Attestati
RNA	Turdus philomelos	SMAP Maschio  Digitale
RNA	Turdus philomelos	SMAP Maschio  Digitale
RNA	Turdus philomelos	SMAP Femmina  Digitale
RNA	Turdus philomelos	SMAP Maschio  Digitale

COMUNICAZIONI

Gentile:

La informiamo che sono state completate le analisi relative al suo ordine numero

Qui di seguito i risultati, che possono essere visualizzati anche collegandosi alla sua pagina personale o utilizzando il seguente link:

I certificati digitali, se richiesti, sono disponibili alla sua pagina personale.

#	Identificativo	Specie	Analisi	Esiti
1	...	Turdus philomelos - Turdus philomelos	SMAP	M
2	...	Turdus philomelos - Turdus philomelos	SMAP	M
3	...	Turdus philomelos - Turdus philomelos	SMAP	F
4	...	Turdus philomelos - Turdus philomelos	SMAP	M

Cordiali saluti

Lo staff
FEM2 - AMBIENTE



FEM2-AMBIENTE
SPIN-OFF ACCREDITATA
DALL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
MILANO-BICOCCA

Servizi di diagnostica molecolare per l'avifauna

SERVIZIO CLIENTI:

da lunedì al venerdì (9.30-18.30)

ufficio@fem2ambiente.com

02 6448 3386 (chiamate)

371 180 9921 (WhatsApp)

Hai ancora dubbi sul nostro servizio?

Visita il sito

avifauna.fem2ambiente.com

Contattaci:

dalle ore 9.30 alle ore 18.30

Telefono: +39 02 6448 3386

Email: communication@fem2ambiente.com

WhatsApp e SMS : 371 180 9921

Facebook: @diagnosticaavifauna